



MASTITIS-SCHNELLTEST LEICHT GEMACHT

VetoSlide

SO WENDEN SIE DEN TEST AN



Nehmen Sie eine sterile Milchprobe des betroffenen Viertels. Bitte Beschriftung nicht vergessen!



Den Test an einem sauberen Ort aufschrauben, heraus-nehmen und dabei die Agarflächen nicht berühren.



Dann die Milch mit Hilfe eines sterilen Wattetupfers großflächig zickzackförmig auf beiden Seiten ausstreichen.



Test vorsichtig zurück in das Röhrchen schieben und zuschrauben. Bitte Beschriftung nicht vergessen!!



Den Test mit dem Deckel nach oben aufrecht in den Inkubator stellen und bis zu 24 h bei 37°C bebrüten.



Nehmen Sie den Test aus dem Inkubator und lesen Sie das Ergebnis ab.

ROTE SEITE
GRAM+ SEITE

Kolonien innerhalb von 24h sichtbar



Wachstum von Gram+ Kolonien

GRÜNE SEITE
GRAM- SEITE

Kolonien innerhalb von 8-12h sichtbar



Wachstum von *E. coli*



Wachstum von Gram-Kolonien

SO INTERPRETIEREN SIE DIE ERGEBNISSE

